


# 人間工学に基づいた 環境にやさしい感染対策

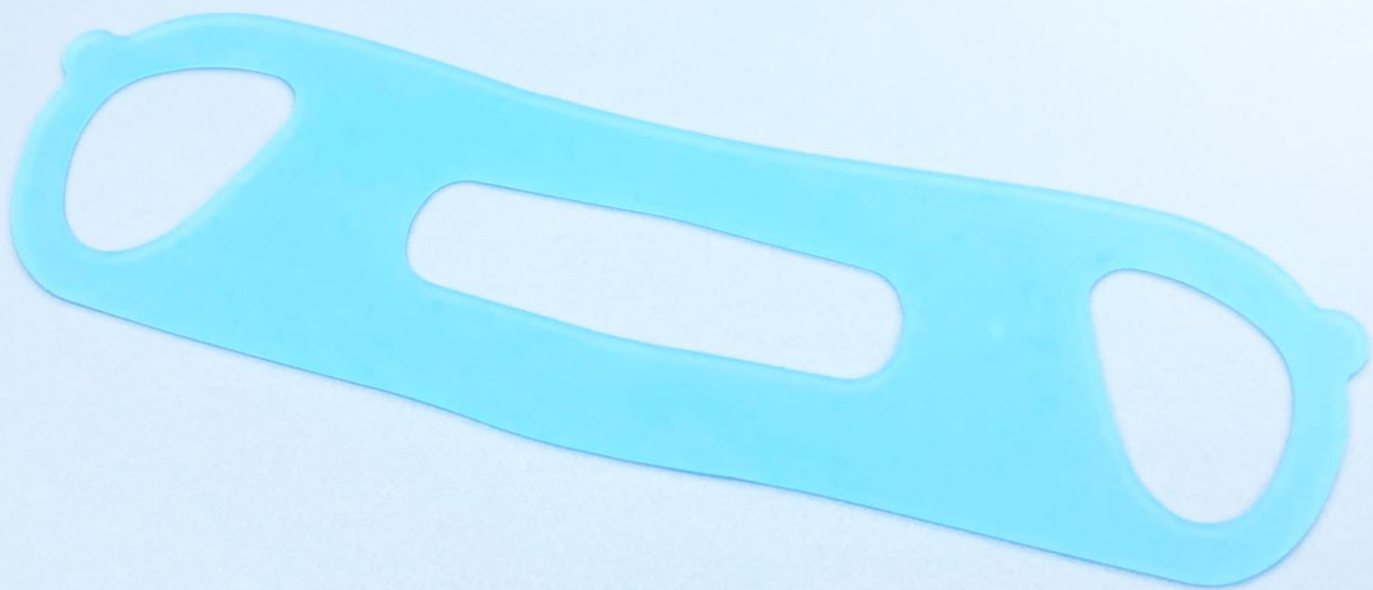

## マスピタ（内視鏡用）

- ◎ 内視鏡検査時の飛沫を低減
- ◎ 洗浄・消毒可能で繰り返し使用可能
- ◎ クリスタルゲル®が肌にフィット

品名	JANコード	サイズ	包装単位
マスピタ（内視鏡用）	4589720790768	フリー	3枚入

マスピタ（内視鏡用）は医療法人山下病院サステナビリティ推進室とタナックの共同研究開発製品です。



販売元：株式会社タナック  
〒500-8185 岐阜県岐阜市元町4丁目24番地  
<https://k.tanac.co.jp/>


お客様相談室  
0120-638-122  
平日9:00~17:00（土日祝日は除く）

Webでさらに  
詳しく



## 装着方法

赤丸の部分が耳の上部に掛かるよう装着してください

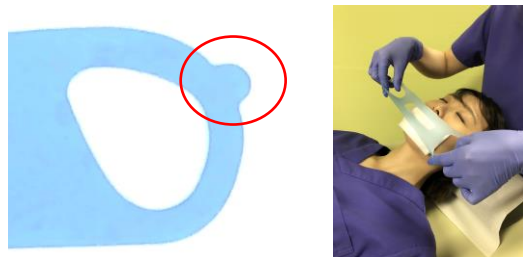


## 洗浄・消毒方法

### ◆ ふき取り消毒の場合

70%エタノールまたは0.05~0.5%の次亜塩素酸ナトリウムを使用

### ◆ 浸漬消毒の場合

- ① 中性洗剤や酵素洗剤を使用し洗浄または浸漬
- ② 0.05~0.5%の次亜塩素酸ナトリウムで 30 分間浸漬  
または、0.55%フタラールで 5 分間浸漬
- ③ 5 分間流水下にてすすぎ、水気を拭き取り乾燥

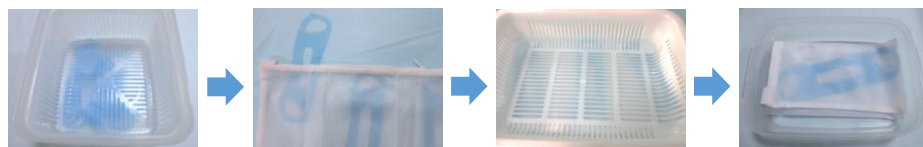

※ 消毒時は製品同士が張り付かないよう、ネットに入れる、ガーゼを挟むなどの対策を推奨

## ご使用上の注意点

- ・耐熱温度は 80 度のため、オートクレーブなど高温となる機械には入れないで下さい
- ・繰り返しの洗浄で退色（黄変）、べたつきが発生することがあります（交換目安20回）

内視鏡検査時の飛沫を抑えることは、医療現場での大きな課題と  
なっています。本製品は人間工学に基づいてサイズ設計され、環境  
にも配慮しており持続可能な飛沫抑制予防策の一つとして使用可能  
です。嘔吐反射の少ない経鼻内視鏡との併用、ガーゼでも併用出来  
ることは大きなメリットであると考えています。

医療法人山下病院 看護師・内視鏡技師・認定人間工学準専門家

常見麻笑先生